



Vejledning til **Clover 3**



Hent nyeste version af denne vejledning på adressen
lysoglup.dk/upload_dir/docs/Clover_3_brugsvejledning.pdf
eller scan QR-koden til venstre

Se video-vejledningen til Clover 3 på adressen
youtu.be/dOFIsBPGok0
eller scan QR-koden til højre



Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed og vedligeholdelse	2
Rundt om Clover 3.....	2
Opladning	3
Tænde og slukke	4
Justere forstørrelsen.....	4
Justere skærmens lysstyrke	4
Kontrastforstærkende farver	5
”Fastfryse” billedet	5
Brug af læselys.....	5
Støtteben til skrivearbejde	6
Tænde og slukke for bip-lyde.....	6
Fejlsøgning	6
Clover 3 kan ikke tænde eller slukke	6
Skærmen er helt sort eller helt hvid.....	6
Billedet er statisk (”står stille”)	7
Pletter eller ”tåge” på skærmen.....	7
Clover 3 ”opfører sig underligt” (nulstilling).....	7
Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?.....	7
Tekniske specifikationer	7

Introduktion

Tillykke med – og tak for – anskaffelsen af Deres Clover 3. For at få det fulde udbytte, anbefales De at læse denne vejledning helt igennem. Alternativt kan De lære de grundlæggende detaljer at kende ved at læse til og med side 5, og

derefter bruge resten af vejledningen som et opslagsværk, når De vil vide noget om en bestemt funktion.

De behøver ikke være forsigtig med at prøve funktionerne: **De kan ikke "ødelægge" Deres Clover 3 ved at trykke på en forkert knap** – det værste der kan ske, er at apparatet måske opfører sig mærkeligt. Hvis det skulle ske, er der en måde at genoprette den måde det var på, da De modtog det – mere om hvordan det gøres på side 7.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Før De tager Clover 3 i brug første gang, skal det indbyggede batteri lades op – se mere på side 3 om, hvordan dette gøres.
- Brug kun Clover 3 ved temperaturer mellem 10 og 35 grader Celcius.
- Hold Clover 3 tør; undgå vand og andre væsker, også ved rengøring.
- Benyt altid den medleverede lysnet-adapter til opladning af Clover 3. Selv om en anden adapter har et stik der passer, kan både adapteren og Clover 3 tage skade derved.
- Undlad at skille apparatet ad. Oplever De problemer med det, henvises til afsnittet om fejlsøgning på side 6. Hvis anvisningerne deri ikke afhjælper problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation – vores kontaktoplysninger står nederst på forsiden af denne vejledning.

Rundt om Clover 3

I det følgende opregnes alle de knapper, stik og andre ting der sidder rundt omkring på Deres Clover 3, alle med et nummer. Når denne vejledning nævner en af detaljerne, henvises til numrene i denne oversigt:

1. 3½-tommer skærm
2. Knap til fastfrysning af billedet
3. Bærestrop
4. USB-stik til opladning mv.
5. Tænd- og sluk-knap
6. Indikatorlampe
7. Kamera
8. Læselys
9. Udfoldeligt støtteben
10. Zoom- og farvevalgs-knap


Der medfølger desuden fabrikantens egen brugsvejledning (på engelsk), lysnetadapter til opladning, pudseklud, opbevarings-etui samt USB-kabel.

Opladning

Clover 3 har et indbygget, opladeligt batteri, som lades op ved hjælp af den medleverede lysnet-adapter samt USB-kablet: Sæt det største af stikkene på USB-kablet i lysnet-adapteren, og det mindre stik i USB-forbindelsen på Clover 3 (nr. 4 på illustrationen side 3). Sæt derefter lysnet-adapteren i en ledig stikkontakt, og tænd for strømmen. Mens opladningen foregår, lyser den lille indikatorlampe (nr. 6 på illustrationen side 3) grønt – når den slukker, er batteriet ladet helt op (dette tager cirka tre timer, hvis batteriet var helt tømt da opladningen begyndte).

Der er to måder at se, hvor meget strøm der er på batteriet

- Den lille indikatorlampe (nr. 6 på illustrationen side 3) skifter til rødt lys, når der ikke er ret meget strøm tilbage i batteriet. Når batteriet er lige ved at være helt tømt for strøm, blinker indikatorlampen rødt.

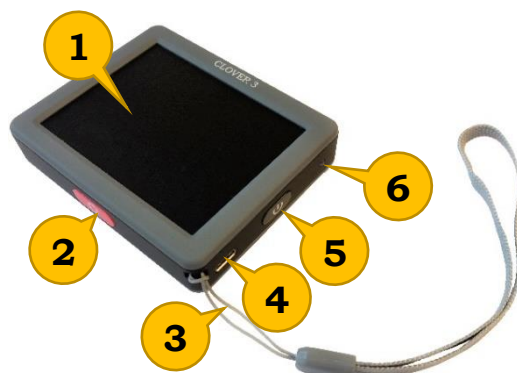

- Ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) kan De kalde oplysninger frem på skærmen om bl.a. batteriets ladestand.

Husk at De også kan bruge Clover 3 mens den er sluttet til lysnetadapteren og lader op. Sidder De indenfor rækkevidde af en ledig stikkontakt, kan De således bruge Deres Clover 3, selv om batteriet er tomt (eller næsten tomt).

Tænde og slukke

Tryk tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) ind, og **hold den inde** i tre sekunder. Dette gælder både når De vil tænde og slukke for Clover 3.

Bemærk at Clover 3 har en særlig strømbesparelses-funktion, som automatisk slukker for apparatet, når motivet foran kameraet ikke har flyttet sig, eller De trykker på en af apparatets knapper i tre minutter i træk.

Justere forstørrelsen

Deres Clover 3 kan forstørre fra 3,8 til 16 gange (når den ligger fladt mod en tekstside): Forstørrelsen justeres ved at skubbe zoom- og farvevalgs-knappen (nr. 10 på illustrationen side 3) til højre for at forøge forstørrelsen, eller til venstre for at reducere forstørrelsen.

Justere skærmens lysstyrke

Lysstyrken i skærbilledet på Clover 3 kan justeres efter Deres behov. For at gøre dette, skal De trykke tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) ind og holde den inde mens De skyder zoom- og farvevalgs-knappen (nr. 10 på illustrationen side 3) til venstre for at skrue ned for lysstyrken, eller til højre for at skrue op for lysstyrken.

Kontrastforstærkende farver

Med Clover 3 har De mulighed for at få det forstørrede billede vist enten i naturlige farver, eller med særlige, kontrastforstærkende farver, som kan gøre tekst lettere at se og læse: Ved at trykke på toppen af zoom- og farvevalgs-knappen (nr. 10 på illustrationen side 3) kan De skifte mellem de tilgængelige farvekombinationer (se tabellen til højre).

Når De har valgt andet end naturlige farver, kan De komme hurtigt tilbage til de naturlige farver ved at trykke zoom- og farvevalgs-knappen ind, og *holde den inde* i to sekunder. Når der er valgt naturlige farver, vil et tilsvarende, 2 sekunders tryk på knappen skifte til den af de øvrige farvetilstande, De sidst har benyttet.

Naturlige farver
Sort på hvid
Hvid på blå
Gul på blå
Grøn på sort
Hvid på sort
Gul på sort
Blå på hvid
Blå på gul
Rød på sort

”Fastfryse” billedet

Med Clover 3 kan De ”fastfryse” det billede, der vises på skærmen, så billedet bliver stående selv om De flytter apparatet fra motivet – dette er nyttigt til f.eks. at ”fange” et telefonnummer eller en internetadresse på skærmen til senere brug.

Når telefonnummeret etc. er på skærmen, trykker De på fastfrysings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3); det får billedet til at ”stå stille”, indtil De trykker på fastfrysings-knappen igen.

Mens billedet er ”fastfrosset” på denne måde, kan De justere forstørrelsen og farvetilstanden som beskrevet ovenfor. De kan dog ikke ændre på skærmens lysstyrke som omtalt tidligere, mens billedet er fastfrosset.

Brug af læselys

Sammen med kameraet (nr. 7 på illustrationen side 3) på Clover 3’s bagside forefindes nogle små lamper, der belyser det som kameraet ”ser” på. For at tænde og slukke for disse lamper, skal De trykke tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) ind og *holde den inde* mens De trykker på fastfrysings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3).

Støtteben til skrivearbejde

Deres Clover 3 har et lille, udfoldeligt støtteben på bagsiden (nr. 9 på illustrationen side 3): Når dette ben er slået ud, kan Clover 3 stå i en vinkel, så De nemt kan "komme til" bag ved apparatet med et skriveredskab, og samtidig se hvad De skriver på skærmens forstørrede billede.



Tænde og slukke for bip-lyde

Clover 3 giver et lille hørbart "bip" ved visse lejligheder; når der tændes for apparatet, når der trykkes på knapper, og når batteriet er ved at være tømt for strøm. De kan vælge disse lyde fra eller til ved at trykke på fastfrysings-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3) og holde den inde i tre sekunder.

Fejlsøgning

Hvis De oplever et problem med Deres Clover 3, kan dette kapitel hjælpe med at løse problemet.

Clover 3 kan ikke tænde eller slukke

- Sæt lysnet-adapteren til, og se om apparatet kan tænde – i så fald trængte det blot til en opladning.
- Prøv følgende for at nulstille apparatet. Dette gøres ved at trykke samtidig på tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3), zoom- og farvevalgsknappen (nr. 10) samt fastfrysings-knappen (nr. 2).

Skærmen er helt sort eller helt hvid

- Hvis Clover 3 ligger fladt på en overflade, så prøv at løfte den og se om der "sker" noget på skærmen.
- Prøv at skrue ned for forstørrelsen (skub den blå zoom- og farvevalgsknap på apparatets overkant til venstre).
- Prøv at skifte farvetilstand (tryk den blå zoom- og farvevalgsknap på apparatets overkant ned).
- Sluk apparatet og tænd det igen.

Billedet er statisk ("står stille")

- Så har De nok aktiveret fastfrysning-funktionen. Tryk på den røde fastfrysning-knap på apparatets underkant for at "starte" billedet igen.
- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (nr. 5 på illustrationen side 3) for at se batteriets aktuelle ladestand.
- Sluk apparatet og tænd det igen.

Pletter eller "tåge" på skærmen

- Juster skærmens lysstyrke som beskrevet på side 5.
- Rengør skærmen på forsiden og kameraet på bagsiden med den medfølgende pudseklud.

Clover 3 "opfører sig underligt" (nulstilling)

Hvis De "eksperimenterer" lidt med Clover 3's funktioner, kan det hænde at De får lavet en indstilling, som får apparatet til at opføre sig "underligt" – og ikke kan huske hvad det var De ændrede på. Som en "nødløsning" kan man nulstille alle indstillinger, så de bliver som de var, da apparatet forlod fabrikken.

For at gøre dette, skal De trykke fastfrysning-knappen (nr. 2 på illustrationen side 3) og zoom- og farvevalgs-knappen ind – og holde dem inde i 5 sekunder "nulstilles" alle indstillinger i Clover 3: Dette kan undertiden afhjælpe et oplevet problem.

Intet af ovenstående hjælp – hvad gør man så?

Hvis De ikke kan afhjælpe problemet, bedes De kontakte Lys og lup med henblik på reparation af apparatet; vores kontaktoplysninger findes nederst på forsiden af denne vejledning.

Tekniske specifikationer

Forstørrelse	3,8 – 16 gange
Ydre mål	9 x 7 x 2 cm
Vægt	Under 150 gram