




Kvik-guide til

Zoomax Snow 10 Pro


elektronisk forstørrelsesapparat

Overblik over knapperne og deres funktion:

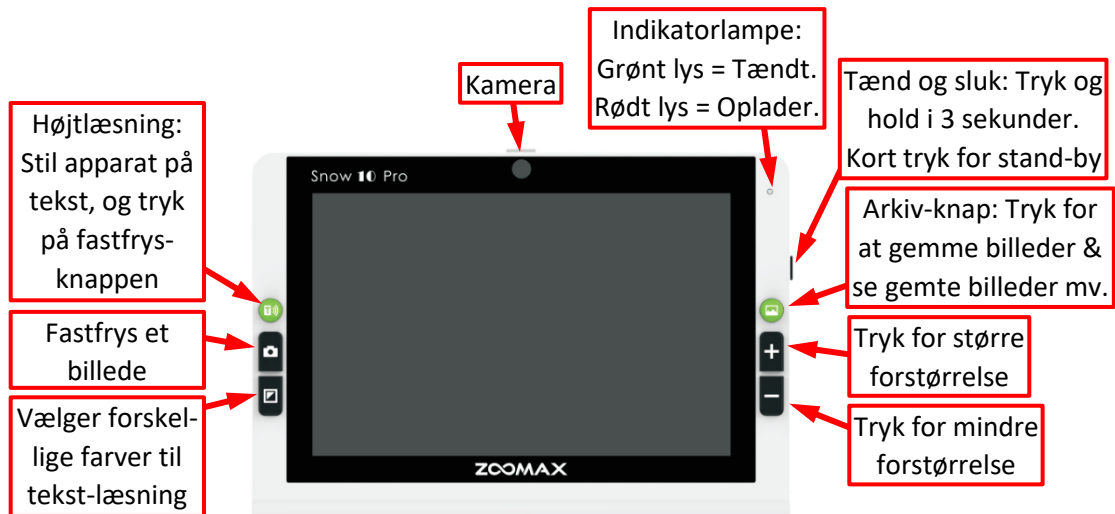

Opladning:

Den tynde ledning på opladeren sættes i Snow 10 Pro. Sæt strømkablet i opladerens modsatte ende, og sæt strømkablets store stik i en ledig stikkontakt, og tænd for strømmen. Lampen i øverste venstre hjørne lyser rødt under opladning.

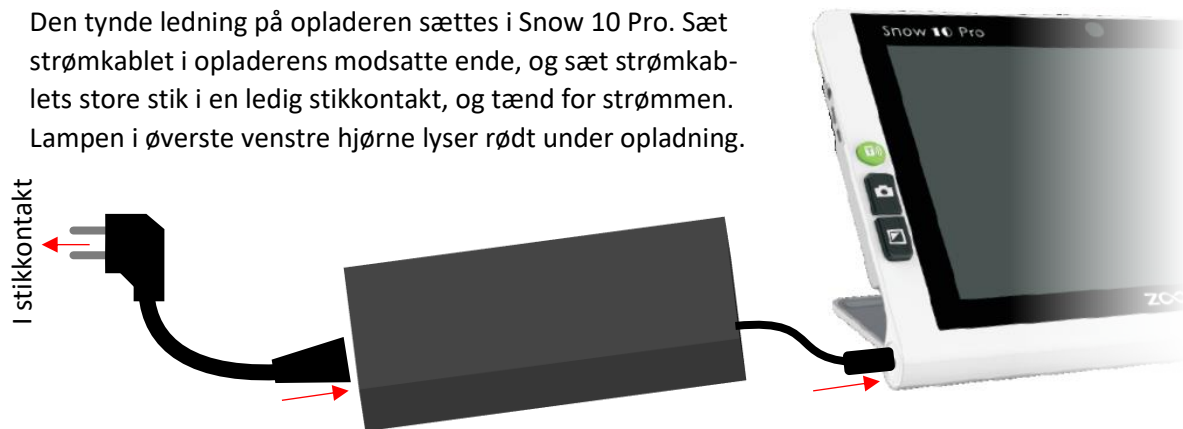

Vi har lagt den komplette vejledning til Snow 10 Pro ind i apparatet. For at læse den, skal De:

1. Tryk på den grønne arkiv-knap lige til højre for skærmen.
2. Tryk på feltet mærket **PDF** på skærmen.
3. Tryk på feltet mærket **Zoomax Snow 10 Pro** og **1** på skærmen.
4. Berør skærmen og "stryg" opad eller nedad for at "bladre" i vejledningens sider.