




Kvikguide til Enhanced Vision's Amigo HD

Opladning

Den medfølgende adapter leveres med stikben, der passer til forskellige landes stikkontakter. Sæt den danske/europæiske adapter i, som vist til højre, sæt adapteren i en stikkontakt, og sæt stikket i den frie ende af adapterens kabel i stikket på venstre side af Deres Amigo HD, som vist til venstre.

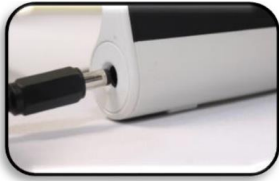

Det anbefales at lade Amigo HD **helt** op, første gang De tager apparatet i brug. Når apparatet er ladet helt op, kan det klare 3-5 timers drift før næste opladning.



Tænd og sluk

Amigo HD tændes og slukkes ved at trykke på den grønne knap nederst på apparatets højre side, og **holde den i bund** i nogle sekunder, til der høres en klokkelyd.

Skru op og ned for forstørrelsen

Forstørrelsesgraden justeres ved hjælp af de to gule knapper, mærket med minus- og plus-tegn langs apparatets højre kant.

Kontrasttilstande



Ved at trykke på den blå knap med den halvt fyldte cirkel langs apparatets venstre kant, kan De vælge mellem naturlige farver, samt en række særligt kontrastforstærkede farvetilstande, der fremhæver tekst og andre detaljer. Tryk nogle gange på denne knap, til De får et resultat, der letter Deres læsning.



Tænd og sluk for det indbyggede lys

På bagsiden af Amigo HD findes et par "læse-lamper": For at tænde og slukke for disse, skal De trykke **samtidigt** på den blå knap til valg af farve/kontrasttilstande ved apparatets venstre kant, **samt** den gule knap med plus-tegnets ved apparatets højre kant. Samme kombination bruges til at slukke lyset igen.

Støttefod og fokusering

Deres Amigo HD har en udklappelig støttefod på bagsiden: Når denne er slået ud, indstilles kameraet til at "se tæt på"; ideelt til læsning, skrivearbejde etc.



Når støttefoden er klappet ind, indstilles kameraet til at "se på afstand": Med foden i denne stilling kan De holde apparatet op foran Dem, og bruge det omtrent som en kikkert – se eksempel til højre.



Fastfrys et billede

De kan "fastfryse" billedet på skærmen: Over de to gule knapper til højre findes en lille grå knap, som dels kan trykkes ned, dels skubbes op, ned, til højre og til venstre: Tryk på denne knap **og hold den nede** i to-tre sekunder, indtil De hører en klokkelyd. Nu "fastholdes" billedet på skærmen, indtil De igen trykker den lille grå knap og holder den nede i nogle få sekunder.


Husk, at De kan bruge såvel de gule forstørrelsesknapper, samt benytte de kontrastforstærkede farvetilstande på et "fastfrosset" billede, på samme måde som med det "levende" billede.

Gem og gense fastfrosne billeder.

Deres Amigo HD kan opbevare cirka 2000 sådanne "fastfrosne" billeder: Når De har "fastfrosset" et billede som beskrevet ovenfor, kan De gemme det til senere brug ved at trykke på den lille hvide knap på apparatets bagside, der er mærket "SAVE/MF".



For at gense billeder De har gemt på denne måde, skal De trykke på den grønne knap ved apparatets venstre kant: Herved kaldes det senest "fastfrosne" billede frem – brug evt. de gule plus- og minus-taster til at bladre frem/tilbage mellem billederne. Tryk en gang mere på den grønne knap for at nærstudere et billede, med mulighed for at zoome ind/ud med plus-m og minus-tasterne, og skifte farvetilstand med den blå knap.

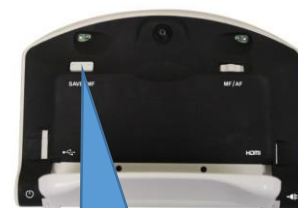

Knap der gemmer et fastfrosset billede

Når der er zoomet ind på et fastfrosset billede, kan De bruge den lille grå firevejs-knap øverst til højre på apparatets front: Skub den opad, nedad, til venstre eller til højre for at flytte det billedudsnit, der vises på skærmen.

Et tryk mere på den grønne knap sender Dem tilbage til billedgalleriet, hvor De kan bladre mellem de gemte billeder.

For at komme ud af dette billedgalleri, og tilbage til det "levende" billede fra kameraet, skal man trykke og holde den grønne knap nede i fem sekunder.

Ur og kalender

Amigo HD har en ur- og kalenderfunktion, der viser det aktuelle klokkeslæt med store typer, samt dato og ugedag: Det kaldes frem ved at trykke på den grønne knap og den gule plus-knap (øverste knap i hver side af apparatets forside) *samtidig*. Samme knapper bruges til at skifte tilbage fra uret til det normale kamerabillede.

Hvis uret/datoen er forkert, henvises til den komplette vejledning for informationer om, hvordan man stiller uret/kalenderen.